
紙ボトル入り栄養剤専用 経腸栄養注入セット

パックテイル®経腸栄養セット



使用方法


1

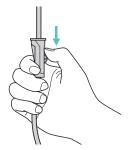

クレンメを閉じます。




栄養剤ボトルのキャップを取り外します。 ※先に専用ホルダーを栄養剤ボトルの底部に取り付けてください。

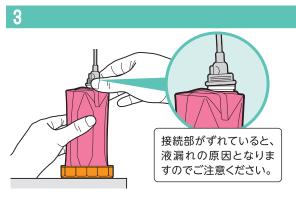

本品のコネクタを栄養剤ボトルの口栓にはめ、コネクタをしっかり締めます。

※栄養剤ボトルを台に置いて行うと安定して作業できます。

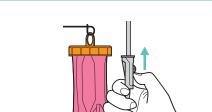

ガートルスタンドにかけ、クレンメを緩めて通液させます。

※点滴量(滴下数)は1mL≒10 滴です。(蒸留水の場合) 栄養剤等の種類により、一滴あたりの容積が異なる場合があります。

注

意

接続後に持ち運ぶ場合は、栄養 剤ボトルを立てた状態あるいは 吊り下げた状態で移動させてく ださい。横に倒した状態では、 液漏れする場合があります。



ボトルを 立てた状態



ボトルを吊り 下げた状態



ボトルを横に 倒した状態

栄養剤ボトルを強く 握ると液漏れする場 合がありますのでご 注意ください。



仕 様

医療機器届出番号:24B3X10008000001 医療機器クラス分類:クラスI(一般医療機器)

ISO80369-3対応


※カテーテル等の接続部が旧規格(医薬発888号)の場合は、変換コネクタが必要です。

商品コード	チューブ径(内径)	チューブ長	包装単位	JANコ ー ド
A60230	3.8mm	150cm	18本×4箱/ケース	4934989805270

〈使用上の注意〉

- ■添付文書の内容を確認の上、使用してください。●使用は一回限りとし、使用後は直ちに廃棄してください。
- ●包装が破損、汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- ●水漏れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

NUTRI: ニュートリー株式会社

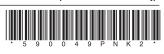

お問い合わせ先 TEL.0120-219-038 https://www.nutri.co.jp