



紙ボトル入り栄養剤の 使用方法

用意するもの

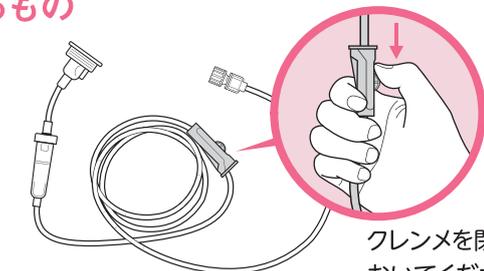

パックテイル®経腸栄養セット

クレンメを閉めて
おいてください。

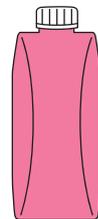


紙ボトル入り栄養剤



パックインホルダー
(専用ホルダー)


1 準備

栄養剤ボトルに専用ホルダーを取り付ける。

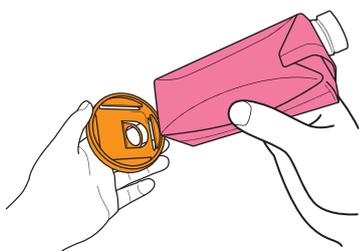


専用ホルダーの四角い枠の中央に
栄養剤ボトルの底部をあわせませす。

約45°回転

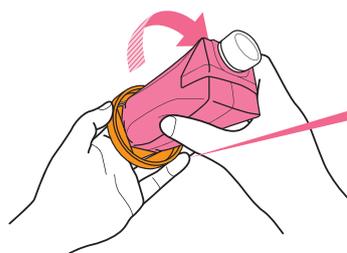

栄養剤ボトルを約45°回転させ
専用ホルダーに容器の角をねじ
入れます。

装着イメージ図

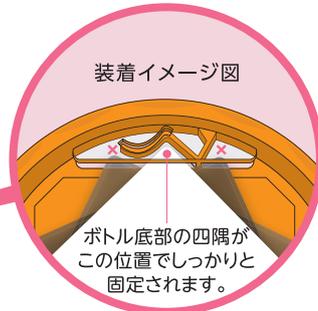

ボトル底部の四隅が
この位置でしっかりと
固定されます。


専用ホルダーに取り付けた栄養剤
ボトルは、取り外して再度取り付け
ると外れやすくなります。注入が
終了するまでは、専用ホルダーから
外さないでください。

2 接続

パックテイル®経腸栄養セットを 栄養剤ボトルに取り付ける。




栄養剤ボトルのキャップを取り
外します。

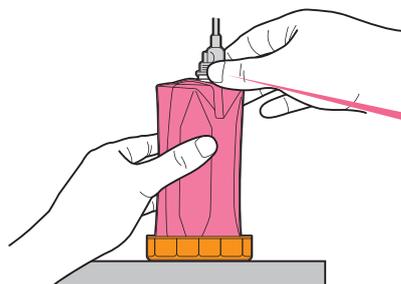


栄養剤ボトルを台に置きます。パックテイル®経腸栄養セットのコネ
クタを栄養剤ボトルの口栓にはめ、コネクタをしっかり締めます。

接続部がずれていると、液漏れ
の原因となりますのでご注意
ください。

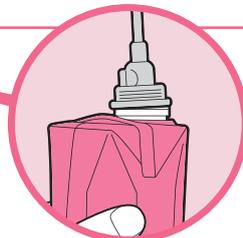

3
注入

スタンドに吊り下げ、注入開始。

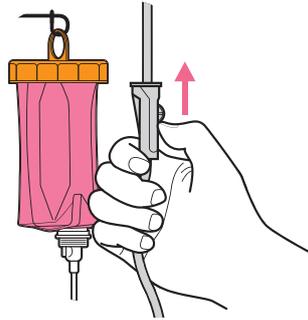

専用ホルダーをガートルスタンドにかけ、
クレンメを緩めて通液させます。

※点滴量(滴下数)は1mL≒10 滴です。(蒸留水の場合)
栄養剤等の種類により、一滴あたりの容積が異なる
場合があります。

注
意

接続後に持ち運ぶ場合は、栄養
剤ボトルを立てた状態あるいは
吊り下げた状態で移動させてく
ださい。横に倒した状態では、
液漏れする場合があります。



ボトルを
立てた状態



ボトルを吊り
下げた状態



ボトルを横に
倒した状態

栄養剤ボトルを強く
握ると液漏れする場
合がありますのでご
注意ください。

